

## 医用モニターのカビネットおよび液晶画面 のお手入れの仕方について

### 【対象製品・モデル名】

ヘルスケアシステム用途 モニター

### 【カビネットおよび液晶画面のお手入れの仕方】

- ・ お手入れの際は、安全のために電源コードを本製品とコンセントから抜いてから行ってください。
- ・ カビネットのほこりは柔らかい布で拭き取ってください。中性洗剤、エタノール、イソプロピルアルコールで軽く湿らせて、油汚れを拭き取ります。使い捨ての布を使用する場合は、その注意書きの指示に従ってください。
- ・ 画面の汚れは、クリーニングクロスに水または水で薄めた中性洗剤を少量しみ込ませてやさしく拭き取り、さらにクリーニングクロスの乾いた部分でもう一度拭いて仕上げてください。市販のクリーナーや弱アルカリ性洗剤を使用すると、画面にダメージを与えることがあります。

### 【注意事項】

- ・ カビネットはプラスチック製です。シンナー、ベンジンは塗布しないでください。プラスチックが損傷したり、コーティングがはがれたりする可能性があります。
- ・ カビネットに殺虫剤や揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。変質や塗料がはげるなどの原因になります。
- ・ 画面は慎重に取り扱ってください。画面には特殊処理加工が施されています。傷つきやすいので硬いものでこすったり、たたいたりしないでください。また、画面を強く押さないでください。画面の輝度ムラの原因となり、場合によっては故障となります。
- ・ 洗剤・薬液がカビネットおよび画面に長時間触れた状態が続いた場合、変色や跡残りが生じることがあります。多量の薬液がカビネットや画面に付着してしまった際は、速やかに乾拭き等して薬液を除去してください。

### 【本件に関するお問い合わせ先】

モニター製品サポートデスク

TEL : 0120-24-2061 FAX : 0258-24-6700

受付時間：月曜日～金曜日 9：00～12：00／13：00～17：00（土、日、祝祭日及び弊社休日を除く）

メールによるお問合せはこちら：[https://inquiry.jvckenwood.co.jp/ask/index.asp?c\\_No=10](https://inquiry.jvckenwood.co.jp/ask/index.asp?c_No=10)