

新型コロナウイルス(COVID-19)に対する消毒について

※下記手順に従って消毒作業をすることで、製品に対する除菌効果が期待できます。

【対象製品】

ヘルスケアシステム用途 モニター全般

【準備するもの】

1. マスク、使い捨て手袋
2. クリーニング用の布地（マイクロファイバークロス等、柔らかく糸くずが出ないもの）
3. 消毒用薬剤

下表の薬液・消毒成分の規定濃度以下での拭き取り清掃については、検証試験により当社医用モニターにダメージが生じないことを確認しています。ただし、同薬液がモニターに長時間触れた状態が続いた場合、外装面および画面に変色や跡残りが生じることがあります。多量の薬液がモニター外装や画面に付着してしまった際は、速やかに乾拭き等して薬液を除去してください。

使用薬液・消毒成分	イソプロピルアルコール (IPA)	エタノール	次亜塩素酸ナトリウム 水溶液	ベンザルコニウム塩化物 液	塩化ラウリルジメチル ベンジルアンモニウム
濃度	70vol%	80vol%	0.05vol%	0.20vol%	10wt%以下
モニター拭き取り 清掃での使用可否	○	○	○	○	○
(薬液例) 商品名、メーカー等	アイシー産業製 IPA99%を蒸留水で希釈	消毒用エタノールIP ケンエー エタノール76.9~81.4vol%	ビューラックス (次亜塩素酸ナトリウム6%) を蒸留水で希釈	タケダ オスバンS (ベンザルコニウム塩化物 10w/v%)を蒸留水で希釈	旭化成 ソフライト除菌

注) シンナー、ベンジン、ワックス、研磨クリーナーは絶対使用しないでください。

注) 消毒用薬剤については、製造・販売者のHPや注意書き等をよくお読みいただくと共に、予め目立たない箇所ですべて試してから安全にご使用ください。

【消毒手順】

1. マスク、使い捨て手袋を装着します。
2. 製品の電源を切り、電源コードを外します。
電源が入った状態や電源に接続されたまま消毒すると、感電や故障の原因となることがあります。
3. その他に接続されているケーブルや機器があれば、すべて取り外します。
4. クリーニング用の布地に消毒液を浸透させます。
注) 消毒液が滴らないようにしてください。製品に直接吹きかけないでください。
5. 製品をまんべんなく拭きます。
注) 画面を拭く際、画面や外枠（ベゼル）を強く押ししたり強くこすらないでください。画面の故障や傷につながる可能性があります。
6. 作業終了後、製品を十分乾かします。
7. 当該製品に添付されていた電源コード、ACアダプタ、接続ケーブルについても、上記手順により消毒を行ってください。その他の接続機器については、それぞれの製造・販売者の指示に従って消毒してください。
8. 作業終了後、マスク、使い捨て手袋は廃棄し、速やかに手洗い・うがいをしてください。
注) 廃棄物はなるべく密閉して廃棄してください。

【消毒後の処置】

1. 製品や電源コード、ケーブルなどが十分乾いていることを確認します。
2. 製品にケーブルや機器を接続します。
3. 電源コードを接続し、電源を入れて正常動作を確認してください。

【本件に関するお問い合わせ先】

モニター製品サポートデスク

TEL : 0120-24-2061 FAX : 0258-24-6700

受付時間 : 月曜日～金曜日 9 : 00～12 : 00 / 13 : 00～17 : 00 (土、日、祝祭日及び弊社休日を除く)

メールによるお問合せはこちら : https://inquiry.jvckenwood.co.jp/ask/index.asp?c_No=10